



フッ素バーニッシュ“エナメラスト”を塗布された患者様へ

製品の塗布後は、歯に薄くフッ素のコーティングが残ります。

治療終了後には以下の点にご注意ください；

- 塗布後、4～6時間は歯磨きや、フロスを使用することは避けてください。
- 塗布後、4～6時間は熱いもの、硬いもの、粘性のあるもの（飲料含む）を摂取しないようにしてください。
- 塗布後4～6時間はアルコールの摂取は控えてください。（アルコールを含む飲料や、マウスウォッシュ等）
- 塗布後4日間は、局所フッ素治療（エナメラスト含む）を行わないでください。

エナメラストは3～6か月に1度塗布をすることをおすすめしています。

定期的な歯科医院での検診を受け、歯のメンテナンスを行いましょう。